

NOKO LOOK

Kojące i fotoprotekcyjne krople do oczu
Wyrób medyczny

NOKO LOOK to kojące, nawilżające i fotoprotekcyjne krople do oczu na bazie usieciowanej karboksymetylocelulozy i protein jedwabiu.

Usieciowana karboksymetyloceluloza: usieciowana karboksymetyloceluloza jest innowacyjną formą karboksymetylocelulozy. Proces poprzecznego usieciowania pozwala uzyskać bardziej stabilne cząsteczki o zwiększonej higroskopijności, lepkości i właściwościach przylegania do powierzchni oka.

Proteiny jedwabiu: proteiny jedwabiu są od dawna stosowane w medycynie. Ich najbardziej znanym zastosowaniem jest produkcja sterylnych nici do zszywania, wykorzystywanych w bardzo delikatnych zabiegach chirurgicznych, takich jak operacje oczu. Ostatnio znalazły one zastosowanie w technikach biomedycznych jako obojętne podłoże do regeneracji tkanek. Mają zdolność pochłaniania wody w ilości odpowiadającej do 30% ich masy. Głównymi składnikami są dwie glikoproteiny: fibroina i serycyna. Fibroina to białko o liniowym kształcie, które przebiega równolegle do włókna.

Natomiast serycyna jest białkiem kulistym, które ma funkcję utrzymywania cząsteczek fibroiny razem i ma działanie nawilżające. Jej skład aminokwasowy jest podobny do Naturalnego Czynnika Nawilżającego obecnego w naszej skórze. Oprócz funkcji nawilżającej, proteiny jedwabiu mają działanie chroniące przed promieniowaniem i wolnymi rodnikami. Niektóre badania wykazały, że proteiny jedwabiu, dzięki swojemu składowi są w stanie pochłaniać światło ultrafioletowe i redukować wolne rodniki.

Wskazania: Dzięki synergii swoich składników NOKO LOOK zapewnia większą stabilność filmu łzowego i chroni oko przed ekspozycją na promieniowanie UV (250-300nm) i przed stresem oksydacyjnym. Ponadto NOKO LOOK tworzy barierę ochronną na powierzchni oka, która sprzyja fizjologicznym procesom gojenia nabłonka rogówki. Produkt może być stosowany również u dzieci.

NOKO LOOK jest wskazany w:

- Leczeniu objawów zespołu suchego oka (np. zaczerwienienie, podrażnienie).
- Zmniejszaniu stresu oksydacyjnego nasilonego przy procesach zapalnych takich jak zapalenie spojówek.
- Podrażnieniach oczu spowodowanych ekspozycją na światło słoneczne.
- Wspiera fizjologiczne procesy regeneracji nabłonka rogówki, w przypadku urazu lub zabiegu chirurgicznego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Zakropnąć jedną lub dwie krople do każdego oka, jeden albo więcej razy dziennie, bądź zgodnie z zaleceniami lekarza. Produkt może być stosowany razem z założonymi soczewkami kontaktowymi.

SKŁAD: usieciowana karboksymetyloceluloza, proteiny jedwabiu, kwas borowy, tetraboran sodu, sól disodowa EDTA, chlorek sodu, microglicin-50, woda oczyszczona.


OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem produktu należy dokładnie umyć ręce.
- Nie stosować produktu w przypadku uczulenia lub znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Po użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę.
- Nie należy stosować produktu po upływie 60 dni od pierwszego otwarcia.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności wskazanego na butelce.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie spożywać.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie zostało uszkodzone .
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Należy uważać, aby końcówka butelki nie zetknęła się z okiem.
- Produkt należy podawać co najmniej 5 minut przed lub po zastosowaniu innych miejscowych produktów okulistycznych.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C.

OPAKOWANIE

10 ml butelka

STERILE A

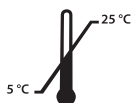

CE 0425
WYRÓB MEDYCZNY

REF DVF002V_USP



10 ml e

 **ITALDEVICE S.r.l.**
Via Laurentina, Km 26,
700 Pomezia-Rzym-Włochy

Dystrybutor
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
☎ 22 543 60 00