

NOKO TRIO

Krople do oczu

NOKO TRIO to wyrób medyczny do stosowania do oczu. Jest to sterylny, środek bez konserwantów o średniej lepkości, fizjologiczny i izosmotyczny, zawierający kwas hialuronowy, kwas rozmarynowy i witaminę B12.

NOKO TRIO ma głównie działanie nawilżające i kojące.

Kwas hialuronowy jest biokompatybilnym polimerem, naturalnie występującym w wielu tkankach ludzkich. Przylega on dobrze do oka, a odpowiednia lepkość i elastyczność zapewnia długotrwałe nawilżenie.

Ponadto przywraca prawidłową objętość łez.

Kwas rozmarynowy i witamina B12 są substancjami antyoksydacyjnymi, które reagują z wolnymi rodnikami i neutralizują je. Działanie antyoksydacyjne zachodzi na powierzchni rogówki.

NOKO TRIO wspomaga fizjologiczne i zintegrowane mechanizmy antyoksydacyjne oraz zwiększa wodnisty składnik filmu łzowego, dzięki czemu zostaje przywrócony trofizm tkanki oka. Produkt jest zatem szczególnie odpowiedni w przypadku zespołu suchego oka, alergii oczu lub innego dyskomfortu oczu wywołanego czynnikami środowiskowymi lub mechanicznymi. Tworzy również tarczę ochronną, dzięki czemu zabezpiecza przed promieniowaniem UV i niebieskim światłem.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

SEZONOWE ALERGICZNE ZAPALENIE SPOJÓWEK, ZESPÓŁ SUCHEGO OKA I DYSKOMFORT OCZU

Łagodzi objawy sezonowego alergicznego zapalenia spojówek, nawet jeśli są powiązane z zespołem suchego oka. Odbudowuje prawidłową ilość łez, natomiast alergeny są usuwane poprzez mruganie, które wywołane jest podaniem kropli, przeciwdziałając zjawiskom oksydacyjnym, wzmacniając fizjologiczne mechanizmy antyoksydacyjne; Redukuje objawy zespołu suchego oka o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, którym towarzyszy swędzenie, pieczenie, uczucie ciała obcego, zaczerwienienie spowodowane:

- czynnikami środowiskowymi takimi jak: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, kurz, ekspozycja na promieniowanie słoneczne, suche lub bardzo gorące powietrze, klimatyzacja;
- czynnikami drażniącymi, np. nieefektywne mruganie na skutek długotrwałego korzystania z komputera lub długotrwałego prowadzenia pojazdu, nauki, noszenia soczewek kontaktowych;
- wiekiem, menopauzą lub okresem postmenopauzalnym, fizjologicznym zmniejszeniem wchłaniania witaminy B12 spowodowanym dietą;
- niedoborami żywieniowymi, takimi jak zmniejszone lub niewystarczające spożycie witamin
- Zapaleniem brzośców powiek. W tym przypadku mruganie po podaniu kropli do oczu ułatwia także uwolnienie ewentualnej wydzieliny znajdującej się na rzęsach.

DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

NOKO TRIO dzięki połączeniu kwasu rozmarynowego i witaminy B12 ma działanie antyoksydacyjne, przeciwdziałając aktywności wolnych rodników (powstających na powierzchni oka po ekspozycji na słońce), które z czasem uszkadzają zarówno nabłonek barwnikowy, jak i fotoreceptory, co w konsekwencji może prowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej i zmętnienia soczewki, oraz zaćmy.

Ponadto, dzięki działaniu antyoksydacyjnemu, **NOKO TRIO** chroni oczy przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV i ŚWIATŁEM NIEBIESKIM, zarówno pochodzenia naturalnego (słonecznego), jak i sztucznego emitowanym przez np. komputer, tablet, smartfon i ekrany telewizorów.

DŁUGOTRWAŁE STOSOWANIE I NOSZENIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

NOKO TRIO jest również wskazany do częstego i długotrwałego stosowania.

NOKO TRIO można stosować wraz z jednodniowymi soczewkami kontaktowymi: niewielka zmiana koloru soczewek po ich wyjęciu nie ma wpływu na ich właściwości optyczne.

SKŁAD

Hialuronian sodu 0,12%, Kwas rozmarynowy (ekstrahowany z *Coleus forskohlii*) 0,020%, Alantoina, Hydroksypropylo-metyloceluloza, Gliceryna, Witamina B12 0,010%, Fosforan sodu jednozasadowy jednowodny, Fosforan sodu dwuzasadowy dwunastowodny, Chlorek sodu, Woda do wstrzykiwań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie umyć i osuszyć ręce;
- Przed pierwszym podaniem zerwać plombę zabezpieczającą;
- Zdjąć nasadkę ochronną;

- Ścisnąć pojemnik i zakroplić po 2 krople do każdego oka, chyba że zalecono inaczej;
- Po każdej kropli odczekać kilka sekund, nie ściskając butelki. Umożliwi to powrót wystarczającej ilości powietrza do systemu, w przeciwnym razie wydostanie się kropli będzie trudniejsze;
- Stopniowe opróżnianie butelki może wiązać się z koniecznością wywarcia większego nacisku, aby umożliwić podanie produktu. Wynika to z właściwości systemu zamknięcia, które pozwalają zachować sterylność oraz właściwości chemiczne i fizyczne roztworów niezawierających środków konserwujących. W butelce zawsze pozostaje niewielka ilość roztworu;
- Strząsnąć kroplę pozostającą na końcówce po użyciu;
- Po użyciu natychmiast zamknąć butelkę nasadką;
- Nie zakładać ponownie nasadki ochronnej, gdy pojemnik jest nadal ściśnięty;
- Nie dotykać niczego końcówką aplikatora, w tym oka lub palców;
- Produkt można używać do 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do oka;
- Produkt jest przeznaczony do używania u jednego pacjenta;
- Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nie było dokładnie zamknięte przy pierwszym otwarciu;
- Nie stosować, w razie widocznych cząstek i/lub zmian w kolorze roztworu;
- Podczas aplikacji nie dotykać oka ani żadnej innej powierzchni krawędzią dozującą pojemnika;
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu;
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej niezgodności dla któregośkolwiek ze składników;
- W przypadku ciężkiego uszkodzenia przezroczystej warstwy z przodu oka (rogówki) fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach powodować mętne plamy na rogówce na skutek gromadzenia się wapnia podczas stosowania produktu;
- Nie zgłaszać żadnych interakcji z lekami lub innymi kroplami do oczu; jednakże należy zachować co najmniej 15-minutowy odstęp pomiędzy podaniem jakichkolwiek innych kropli do oczu;
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza;
- Utylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów;
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci;
- W okresie ciąży lub karmienia piersią, przed zastosowaniem tego produktu należy zasięgnąć porady lekarza;
- Do użytku zewnętrznego, nie polykać;
- Nie należy manipulować ani demontować końcówki dozującej butelki;
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić wytwórcy i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak dotąd nie są znane żadne działania niepożądane wyrobu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zawartość należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.


OPAKOWANIE

Jedna butelka zawiera 10 ml sterylnego roztworu bez konserwantów.

TERMIN WAŻNOŚCI

Patrz data ważności podana na kartoniku i na pojemniku.

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Włochy

Dystrybutor
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
 22 543 60 00

